
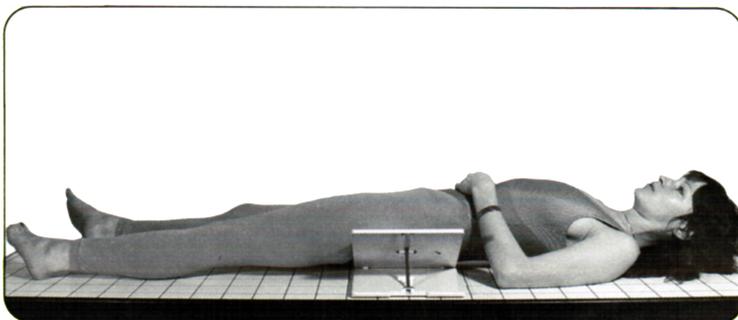
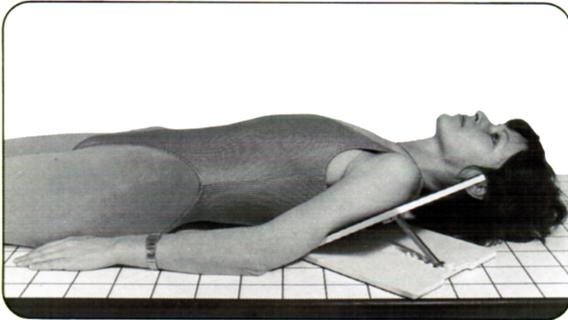


telos Lagerungsklappe

Die Lagerung des Patienten vor der Operation kann entscheidend zu dem Erfolg der Operation beitragen. In jedem Falle beeinflusst die Lagerung den Ablauf der Operation, die Darstellbarkeit des Operationsfeldes, die Blutungsneigung und Zeitdauer der Operation. Um die Lagerung des Patienten vor der Operation zu optimieren, gibt es neben der Variabilität des Operationstisches selbst eine Fülle von Haltevorrichtungen, die am Operationstisch befestigt werden können.

Ihre Handhabung ist aber nicht selten etwas schwierig und bleibt manchmal unbefriedigend. Häufig muss der Patient im Verlaufe der Operation umgelagert werden, wozu gelegentlich neues Abdecken mit entsprechendem Zeitverlust erforderlich wird. Auf den guten, alten Sandsack oder das "Spreukissen" kann vielfach nicht verzichtet werden.

Verblüffend ist die Einfachheit der Bedienung. Selbst eine schwache Hilfskraft im OP kann Dank der Ausnutzung der Hebelkraft die Klappe alleine bedienen.

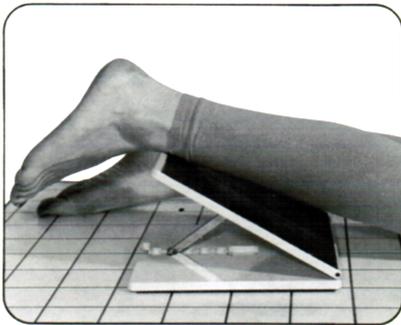

Am häufigsten findet die Klappe Anwendung bei Eingriffen an der unteren Extremität. Zweckmäßigerweise wird sie schon vor dem Abdecken des Patienten in noch zusammengeklapptem Zustand unter eine Gesäßbacke geschoben.

Wenn erst später während der Operation eine Drehung des Beines gewünscht wird, kann sogar das sterile Operationsteam die hinter den Abdecktüchern fühlbare Klappe bedienen. Sollen beide Beine in variablen Lagen operiert werden, bereitet man den Patienten mit zwei Lagerungsklappen vor. Je eine unter den Gesäßbacken.

Im Gegensatz zu dem Sandsack ist die Klappe partiell strahlendurchlässig. Das ist speziell bei Schultereingriffen von Bedeutung.

Erkennt der Operateur erst während der Operation die Notwendigkeit zum Umlagern, ist auch das nachträgliche Unterschieben der Lagerungsklappe kein Problem und in jedem Falle wesentlich einfacher als das Unterschieben von Sandsäcken oder Kissen.

telos Arzt- und Krankenhausbedarf GmbH
Ottostraße 2
61200 Wölfersheim

Telefon: +49 6036 9705 -0
Internet: www.telos-gmbh.com

telos